


Kopfbügel für Hörerkapseln TDH39 und DD45 Anleitung zum Einsetzen der Hörerkapseln

1. Entfernen Sie die Hörerpolster von den Hörerkapseln. Entnehmen Sie die Hörerkapseln aus dem alten Kopfbügel und schrauben Sie das Kabel ab. Bitte achten Sie darauf, den richtigen Schraubendreher zu verwenden (je nach Kopfhörer gibt es hier Unterschiede).

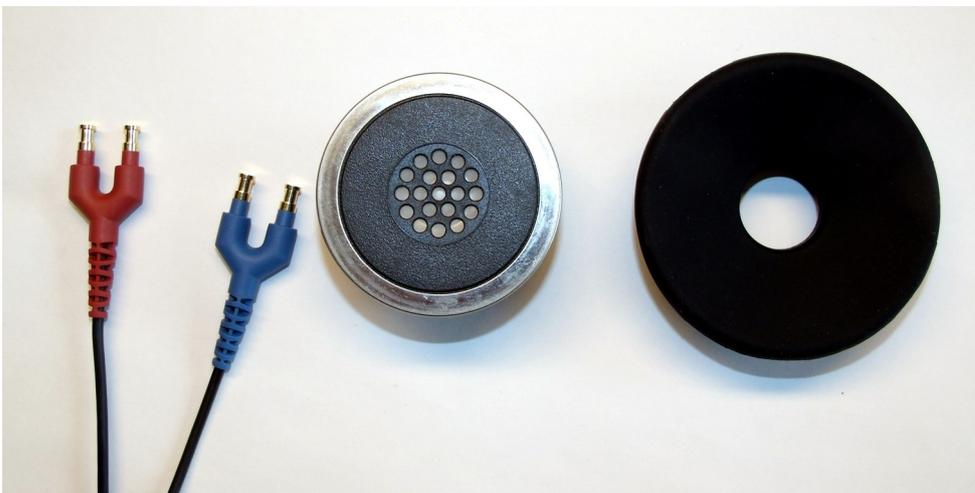

2. Führen Sie die Kabel durch die Öffnungen in den Kunststoff-Schalen.



3. Schrauben Sie das Kabel an die Hörerkapseln.



4. Legen Sie die Hörerkapseln in die Kunststoff-Schalen ein.



5. Stülpen Sie die Hörerpolster auf die Hörerkapseln. Ziehen Sie das Polster auch über den Vorsprung an den Kunststoff-Schalen, da die Kapseln so in den Schalen fixiert werden.

